

## 5 Программа [ЧТЕНИЕ СИГНАЛОВ ИЗ ФАЙЛОВ]

Для запуска программы «Чтение сигналов из файлов» в меню [Регистратор] панели ZetLab выберите команду [Воспроизведение сигналов]. На экране монитора отображается рабочее окно программы «Чтение файлов» (рисунок 5.1).

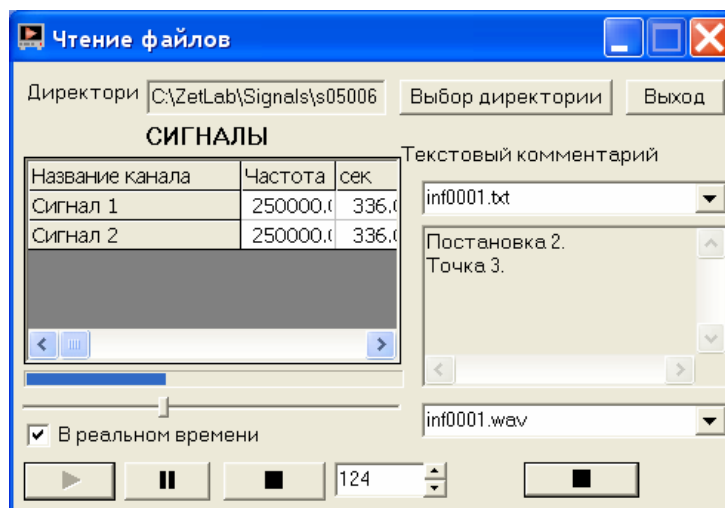


Рисунок 5.1

При нажатии на кнопку [Выбор директории] открывается окно выбора папки сигналов, файлы которой надо прочитать (рисунок 5.2).

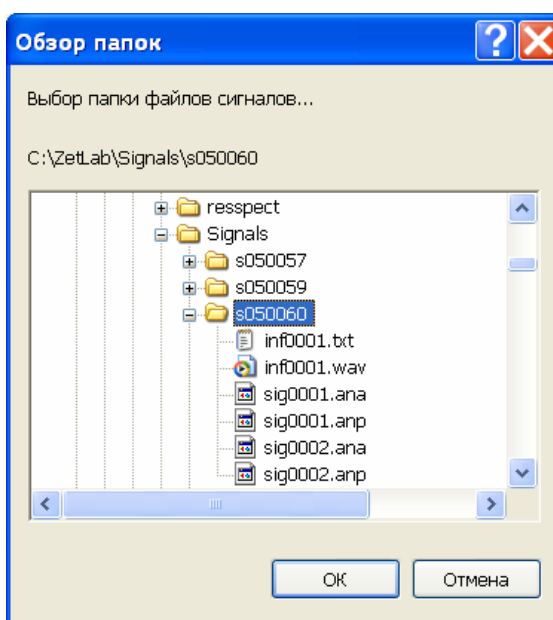






Рисунок 5.2

Вернемся к программе «Чтение файлов».

Под надписью [СИГНАЛЫ] располагается таблица. В ней пять столбцов: название канала, частота дискретизации АЦП в Герцах, продолжительность записи в секундах, дата и время начала записи.


Ниже находится индикатор выполнения чтения.

Кнопка  запускает чтение сигналов. Кнопка  приостанавливает процесс воспроизведения файлов. Кнопка  останавливает процесс воспроизведения файлов.

В поле  мы видим, сколько секунд записи уже воспроизведено. Можно начать воспроизводить файл не сначала, а начиная с какой-то секунды. Для этого устанавливаем нужное нам время в окне при помощи стрелок, или, двигая бегунок на индикаторе выполнения чтения.

В правой части панели находится кнопка **[Выход]**. При нажатии на эту кнопку происходит выход из программы. Закрывать программу можно и крестиком, расположенным в правом верхнем углу окна.

Ниже, в поле со стрелкой (список) выбираем номер текстового комментария к записанным сигналам. В поле под списком отображается текст комментария.

Еще ниже, в поле со стрелкой (список) выбираем номер наговора к записанным сигналам. При нажатии на кнопку  запускаем прослушивание голосового комментария.